

“湯とりあ”ならではの充実の仕様に、  
あなたに合わせた、豊富なカラーやオプションを  
お選びいただけます。

自分だけのお風呂を  
作りませんか？

### シートカラーが選べます

標準カラーはアイボリー。(2番)その他全10色の中からお好きな色をお選び頂けます。



### オリジナル印刷が可能です

浴槽シートには、  
模様や写真を印刷することも可  
能です。あなた  
だけのオリジナ  
ルのお風呂を作  
りませんか？



### 排水ホースが選べます

標準ホースはシートタイプを使用。オーダー対応として、  
取り外しのできるジャバラタイプのホースも選べます。



※ジャバラホースの場合は、オーダー対応のため、別途料金が発生します。

### オプション品

これで既設のお風呂等から直接給湯を行えば、早くお湯を溜めることができます。

給水ポンプ (FP-15S) + 防水型手もとスイッチ + 漏電遮断器 + ポンプ接続ホース + 防水延長コード

5点セット 52,500円



セット内容		価格
<b>給水ポンプ (FP-15S)</b>	<b>防水型手もとスイッチ</b>	15A
【仕様】	【仕様】	①定格電圧……………15mV
①消費電力……………330W	①入・出力電力……………AC100V	②動作時間……………0.1秒以内(高速度)
②定格電圧……………100V	②接続許容電力……………700W(最大)	③ポンプ接続ホース×3m
③定格出力……………50W	③有線コード長(最大)140cm、出力距離150cm	Kanaflex[VS-A2]
④定格吐出……………100L/分	④本体寸法……………約幅41×奥48×高90cm	【仕様】
⑤吐出口径……………25φmm	④重量……………190g	①内径……………32.0mm
⑥最大揚程……………0m	<b>漏電遮断器</b>	②外径……………38.2mm
⑦ホース口径……………φ15・φ25・φ32mm	【仕様】	<b>防水延長コード×5m</b>
⑧質量(電源コードは除く)……………3.6kg	①仕様……………100V	
⑨電源ケーブル(キャプタイプケーブル) 3m		



安全に関するご注意

●介護者の方は入浴中には必ず付き添って下さい。 ●入浴中に固定ベルト、シート押え等を外さないで下さい。  
●浴槽内に湯が残った状態で、浴槽扉を取り外さないで下さい。 ●固定ベルト、シート押えはしっかりと固定して下さい。  
●ポンプ使用の場合は、ポンプの説明書をよくお読みのうえ、ご使用下さい。 ●浴槽シートに高温を加えないで下さい。  
●浴槽シートの洗浄は、風呂用洗剤をご使用下さい。 ●扉の脱着時は周囲に気をつけて行って下さい。  
●浴槽シートに鋭利な物を当てないようにして下さい。 ●入浴中の介護浴槽内にポンプを入れて使用しないで下さい。

※表示価格は全て税込価格です。  
※カタログの商品の仕様は予告なく変更する場合があります。  
※カタログの写真は印刷のため、多少実物と色が異なります。

デイサービスセンターやグループホームなど  
小規模施設さまで大活躍★



# 湯とりあ

防水ファスナータイプ

シャワーキャリーのまま安全に!安心入浴が可能!!

- 個人様で、介護保険や障害者日常生活用具給付をご利用の場合は、ご相談ください。
- 配管設置工事が一切必要ありません!!

TAISコード 01058-000002

デモ商品無料で随時貸し出し中。  
まずは、お気軽にお電話ください。

TEL.0749-85-5488



たっぷりのお湯は気持ちいい?  
リラックス♪リラックス♪



### ■お問合せ

〈観音の里(高月町)から健康福祉機器を企画・開発・発信!〉

こほく あおぞらかんのん [湖北電子(株)]

〒529-0234 滋賀県伊香郡高月町柏原323-3

TEL : 0749-85-5488 FAX : 0749-85-3346

E-mail : info@k-a-kannon.com URL : http://k-a-kannon.com



こほく あおぞらかんのん 福祉事業課

# 好きな大きさ、必要な大きさにオーダーメイドできる簡易型介護浴槽

これまで、お風呂に入るには・・・



機械などで吊り下げられて湯船に。



介護者が抱きかかえて湯船に。

湯とりあなら・・・



段差がないので、シャワーチェアのまま入って入浴でき、安全です。



折り畳めるので、場所も取りません。

簡単組立  
簡単収納

シャワーチェアのままで、簡単に安全にお風呂に入れます。  
高価なリフトやスロープは必要ありません。

従来の入浴は、入浴する人、入浴をお手伝いする人、両方に負担が大きく、吊り下げ用の機械などでは設置工事が必要で、お風呂場は大改造。金銭的な負担も伴います。しかし、「湯とりあ」を使用すれば、面倒な設置工事は一切必要なく、誰でも簡単に設置ができてお値段もリーズナブル。入浴する人、お手伝いする人、それぞれの負担を大きく減らすことができます。



## シャワーチェアフレーム型



※排水ホースのシャワーホースはオーダー対応となります。

シートカラー：2

ステンレスを採用した、重厚感ある浴槽。  
フレーム式のため、  
ワンタッチで簡単に組み立てが出来ます。

仕様 ○材質—ステンレス/ターポリンシート  
○寸法(㎜)—L975×W650×H1000  
○水量(人除く)—約370L  
○重量(フレーム及び浴槽シート)—約23kg  
※シャワーチェアは付属されていません。  
231,000円



浴槽の一部が  
防水ファスナーで開閉



コンパクトに  
折りたたみ可能

### 使用ガイド

- ① フレーム設置**  
折りたたんだフレームを展開します。
- ② 浴槽シート取付け**  
浴槽シートを広げ、後部・側部の順でフレームに固定します。
- ③ シャワーチェアで浴槽内へ**  
前面入り口を開放した状態でシャワーチェアを移動し、体を洗身します。  
※居室でのご利用時には、給湯後に洗身を行ってください。  
排水ホースを浴槽ふちに引っ掛けます。  
※忘れずに引っ掛けてください。
- ④ シャワーチェア浮き上がり防止**  
浴槽内にあるベルトで、シャワーチェアを固定し、浮き上がりを防止します。
- ⑤ ファスナー引き上げ**  
浴槽シートのリングを本体に掛けます。その後、防水ファスナーを引き上げます。
- ⑥ 給湯**  
扉を扉脚差込部に差込み、上部のリングをかけます。  
お湯は一般浴槽などに溜めておき、ポンプ等で給湯を行えば、早くお湯を溜めることができます。
- ⑦ 排水**  
入浴終了後、排水ホースを下ろし、排水を行います。  
※排水時は自然排水となります。
- ⑧ 浴槽シート開放**  
排水終了後、扉を取り外し、浴槽シートを開放して外に出してください。  
※扉の取り外しは排水を完了させてから行ってください。
- ⑨ 収納**  
外に出た後は、フレームから浴槽シートを取り外し、水切りを行ってください。フレームを折りたたんで収納してください。



## シャワーチェアパネル型



※排水ホースのシャワーホースはオーダー対応となります。

シートカラー：2

アルミ合金を使用したことにより  
軽量化を実現した浴槽。  
パネル式にしたため持ち運びも楽に行えます。

仕様 ○材質—アルミ/ターポリンシート  
○寸法(㎜)—L975×W650×H1000  
○水量(人除く)—約370L  
○重量(パネル及び浴槽シート)—約18kg  
※シャワーチェアは付属されていません。  
283,500円



浴槽の一部が  
防水ファスナーで開閉



手軽に持ち運び  
できるパネル式

### 使用ガイド

- ① パネルの設置**  
まず、各パネルを順番に組み立て、設置します。
- ② 浴槽シートの取付け**  
浴槽シートを広げ、後部・側部の順でパネルに固定します。
- ③ シャワーチェアのまま浴槽内へ**  
前面入り口を開放した状態でシャワーチェアを移動し、体を洗身します。  
※居室でのご利用時には、給湯後に洗身を行ってください。  
排水ホースを浴槽ふちに引っ掛け止めます。
- ④ シャワーチェア浮き上がり防止**  
浴槽内にあるベルトで、シャワーチェアを固定し、浮き上がりを防止します。
- ⑤ ファスナー引き上げ**  
浴槽シートのリングをパネルに引っ掛けます。その後、防水ファスナーを引上げます。
- ⑥ 給湯**  
扉を扉脚差込部に差込み、扉を固定します。  
お湯は一般浴槽などに溜めておき、ポンプ等で給湯を行えば、早くお湯を溜めることができます。
- ⑦ 排水**  
入浴終了後、排水ホースを下ろし、排水を行います。  
※排水時は自然排水となります。
- ⑧ 浴槽シート開放**  
排水終了後、扉を取り外し、浴槽シートを開放して外に出してください。  
※扉の取り外しは排水を完了させてから行ってください。
- ⑨ 収納**  
外に出た後は、浴槽シートを取り外し、水切りを行ってください。その後、各パネルを取り外し、収納して下さい。

