

小規模
施設様向

オーダーメイドできる簡易型介護浴槽

湯とりあ

防水ファスナータイプ

TAISコード 01058-000002

無料でモニター貸し出しできます。
まずは、お気軽にお電話ください。

TEL.0749-85-5488

浴槽の一部が
防水ファスナーで開閉

段差がないので
入浴ラクラク

コンパクトな
折りたたみ式



どんな寸法でも
作ります!

- 個人様で、介護保険ご利用の場合は、ご相談ください。
- 配管設置工事が一切ありません!!
- 全国配送無料。
販売価格は23万円台から!


たっぷりのお湯は気持ちいい♪
リラックス♪ リラックス♪

これまで、お風呂に入るには・・・


湯とりあ なら・・・



機械などで吊り下げられて湯船に。

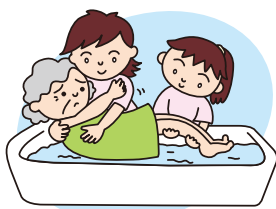


介護者が抱きかかえて湯船に。

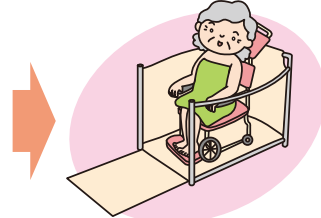

段差がないので、シャワーチェアのまま入って入浴でき、安全です。

簡単組立
簡単収納

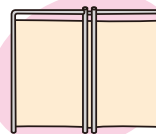

折り畳めるので、場所も取りません。

従来のお風呂は、入浴する人、入浴をお手伝いする人、両方に負担が大きく、吊り下げ用の機械などでは設置工事が必要で、お風呂場は大改装。金銭的な負担も伴いました。しかし、“湯とりあ”を使用すれば、面倒な設置工事は一切不要で、誰でも簡単に設置ができてお値段もリーズナブル。入浴する人、お手伝いする人、それぞれの負担を大きく減らすことができます。



こほく あおぞらかんのん 福祉事業課



シャワーキャリー型



入浴時の
シャワーキャリー
固定フック付き
(しっかり安定)



シートカラー:2

シャワーキャリーのままで、簡単に安全にお風呂に入れます。
高価なリフトやスロープは必要ありません。

仕様 ○材質…ステンレス/ターポリンシート
○寸法(mm)…L975×W600×H1000
○水量(人除く)…約370L

希望小売価格 **231,000円**

オーダーメイド寸法
対応可能

基本的に全てオーダー製作です。特殊仕様とならなければ、オーダーメイドで価格がアップすることはありません。

シートカラーが
選べます

標準カラーはアイボリー。(2番)
その他全10色の中から好きな色をお選び頂けます。



自分だけのお風呂を
作りませんか?



浴槽シートには、模様や
写真を印刷することも
可能です。あなただけ
のオリジナルのお風呂
を作りませんか?

給水ポンプ、ホース、漏電防止ブレーカーは、オプションで対応させて頂きます。



安全に関するご注意

- 介護者の方は入浴中には必ず付き添って下さい。
- 入浴中に固定ベルト、シート押え等を外さないで下さい。
- 浴槽内に湯が残った状態で、浴槽扉を取り外さないで下さい。
- 固定ベルト、シート押えはしっかりと固定して下さい。
- ポンプ使用の場合は、ポンプの説明書をよくお読みのうえ、ご使用下さい。
- 浴槽シートに高熱を加えないで下さい。
- 浴槽シートの洗浄は、風呂用洗剤をご使用下さい。
- 扉の脱着時は周囲に気をつけて行って下さい。
- 浴槽シートに鋭利な物を当てないようにして下さい。
- 入浴中の介護浴槽内にポンプを入れて使用しないで下さい。

※表示価格は全て税込価格です。
※カタログの商品の仕様は予告なく
変更する場合があります。
※カタログの写真は印刷の為、多少
実物と色が異なります。

使用ガイド

① フレーム設置

折りたたんだフレームを展開します。



② 浴槽シート取付け

浴槽シートを広げ、後部・側部の順
でフレームに固定します。



③ シャワーキャリーで 浴槽内へ

前面入り口を開放した状態でシャワ
ーキャリーを移動し、体を洗身します。
※居室でのご利用時には、給湯後に洗
身を行ってください。


排水ホースを浴槽ふちに引っ掛け
ます。

※忘れずに引っ掛けてください。



④ ファスナー引き上げ

浴槽シートのリングを本体に掛け
ます。その後、防水ファスナーを引
き上げます。

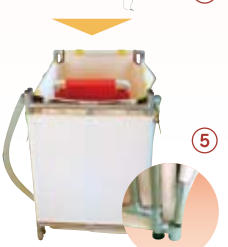

⑤ 給湯

扉を固定プレートに差込み、上部
のリングをかけます。

お湯は一般浴槽などに溜めておき、
ポンプ等で給湯を行えば、早くお湯
を溜めることができます。



⑥ 排水

入浴終了後、排水ホースを下ろし、
排水を行います。


※排水時は自然排水となります。



⑦ 浴槽シート開放

排水終了後、扉を取り外し、浴槽シ
ートを開放して外に出してください。

※扉の取り外しは排水を完了させてか
ら行ってください。

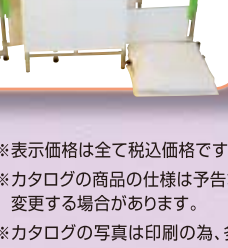

⑧ 収納

外に出た後は、フレームから浴槽
シートを取り外し、水切りを行って
ください。

フレームを折りたたんで収納して
ください。

お問合せ

〈観音の里(高月町)から健康福祉機器を企画・開発・発信!〉

こほく あおぞらかんのん 福祉事業課

湖北電子株式会社

〒529-0234 滋賀県伊香郡高月町柏原323-3

TEL : 0749-85-5488 FAX : 0749-85-3346

E-mail : info@k-a-kannon.com URL : http://k-a-kannon.com

